



**KaVo PROPHYflex™ Perio Powder – 1.009.3732**

fr

**Informations pour l'utilisateur**

KaVo, PROPHYflex et PROPHYflex Perio Powder sont des marques déposées ou des marques de la société KaVo Dental GmbH.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

**Service technique KaVo**

Pour toute question technique ou réclamation, s'adresser au service technique KaVo :  
+49 (0) 7351 56-1000  
service.instrumente@kavo.com

**Groupe cible**

Le mode d'emploi s'adresse au personnel médical, en particulier les chirurgiens dentistes et le personnel du cabinet.

**Sigles et symboles généraux**

- Informations importantes pour l'utilisateur et le technicien
- Demande d'action
- Respecter le mode d'emploi
- Respecter le manuel d'utilisation électronique
- Attention : tenir compte des documents d'accompagnement
- Code HIBC
- Sigle CE selon Produits médicaux
- Appareil médical, marquage des produits médicaux
- Température de stockage : -10 °C à +25 °C (+14 °F à +77 °F)  
Température de transport : -10 °C à +40 °C (+14 °F à +104 °F)
- Humidité relative : 10 % à 85 %, sans condensation
- Pression d'air : 700 hPa à 1 060 hPa (10 psi à 15 psi)
- Protéger contre l'humidité
- Respecter la date de péremption
- Fabricant
- Date de fabrication
- Lot de production
- Quantité
- Ne pas réutiliser - seulement pour usage unique
- Agiter avant utilisation.
- Recyclable

**Transport et stockage**

- ▶ Ne pas stocker à proximité d'une source de chaleur.
- ▶ Stocker entre -10 °C et 25 °C et à une humidité relative de l'air comprise entre 10 % et 85 %.
- ▶ Agiter avant utilisation.
- ▶ Refermer le réservoir de poudre après l'utilisation avec le couvercle.
- ▶ Ne pas dépasser la date d'expiration de 2 ans.

**Loi en matière d'emballages actuellement en vigueur**

Éliminer correctement les emballages par des entreprises d'élimination/des sociétés de recyclage, conformément à la législation sur les emballages en vigueur. Respecter également le système de reprise généralisé. Pour ce faire, KaVo a déposé une licence sur ses emballages. Respecter le système de recyclage des déchets applicable dans votre région.

**Sécurité**

**REMARQUE**

Tous les incidents graves liés à l'utilisation du produit doivent être communiqués au fabricant ainsi qu'aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel réside l'utilisateur et/ou le patient.

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et doit être lu attentivement avant utilisation et rester disponible à tout instant.

Le produit ne doit être utilisé que conformément à l'usage prévu, toute utilisation à d'autres fins est interdite.

**Équipement de protection**

Pendant le traitement, la poudre PROPHYflex Perio Powder peut être aspirée ou entrer en contact avec les yeux de l'utilisateur ou des patients.

- ▶ Le patient et l'utilisateur doivent porter une protection oculaire.

**Mode d'emploi**

- ▶ Porter un masque de protection et des gants lors de l'utilisation.
- ▶ Lors de l'application, utiliser une grande canule d'aspiration de l'unité de soins.
- ▶ Appliquer de la Vaseline sur les lèvres du patient.
- ▶ Laver les mains après utilisation de la poudre de glycine.
- ▶ Nettoyer le visage du patient après l'application de la poudre de glycine (par ex. avec une lingette humide).
- ▶ Porter une coiffe et des vêtements étanches aux particules lors du travail.
- ▶ KaVo recommande de toujours travailler avec une digue de caoutchouc et une aspiration.

**Description du produit**

**Destination :**

La poudre KaVo PROPHYflex™ Perio Powder s'utilise pour les traitements infra-gingivaux, y compris le traitement des parodontites et des péri-implantites.

La poudre KaVo PROPHYflex™ Perio Powder est destinée à être utilisée dans les aéropolisseurs disponibles dans le commerce.

**Utilisation conforme :**

Cette poudre permet d'éliminer le biofilm infra-gingival ; elle est recommandée pour les traitements de nettoyage suivants :

- Retirer le biofilm à l'origine de la parodontite
- Conserver les implants (y compris du polissage en titane)
- Effectuer un traitement de suivi de la parodontite après le traitement initial


**Contre-indications**

- Les patients souffrant de bronchite ou d'asthme ne doivent en aucun cas bénéficier d'un traitement par aéropolisseur. Le jet d'air et de poudre peut provoquer des troubles respiratoires.
- Les personnes fragiles peuvent développer une réaction sensible à la glycine. En cas de réactions allergiques, arrêter le traitement et ne plus utiliser le produit. Retirer toute la poudre de la bouche du patient.
- Le traitement de poches parodontales profondes peut entraîner une bactériémie. Pour les patients à risque (souffrant d'une faiblesse générale du système immunitaire, d'endocardite), prévoir les restrictions nécessaires pour le traitement.
- Ne pas diriger le jet de poudre sur les obturations, les couronnes ou les ponts, étant donné que cela pourrait endommager les restaurations.
- La poudre PROPHYflex™ Perio Powder permet d'éliminer les concrétions et le tartre.

**Application**

- ▶ Ne dépasser pas la hauteur de remplissage maximale de la poudre indiquée sur le réservoir.
- ▶ En cas de poches parodontales (jusqu'à 5 mm), asperger chaque côté de la dent pendant au max. 5 secondes par poche.
- ▶ Ne pas orienter le jet sur un point précis, mais décrire des mouvements circulaires pour assurer un nettoyage uniforme.

L'angle entre le bout de la pièce à main et la dent doit se situer entre 30° et 60°. Plus l'angle est petit, plus la poudre sera pulvérisée dans la poche.

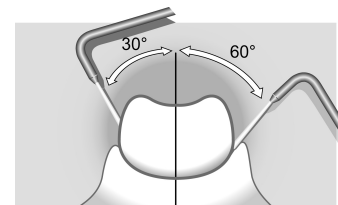

**Outils de travail**

Également disponible pour le traitement supragingival :

- Poudre PROPHYflex™ disponible dans les goûts suivants :
  - Orange (N° d'article 1.007.0014)
  - Berry (fruits des bois) (N° d'article 1.007.0015)
  - Cherry (cerise) (N° d'article 1.007.0016)
  - Menthe (N° d'article 1.007.0017)
- Poudre PROPHYpearls™ disponible dans les goûts suivants :
  - Neutre, en bâtonnets (N° d'article 1.010.1826)
  - Menthe, en bâtonnets (N° d'article 1.010.1828)
  - Peach (pêche) en bâtonnets (N° d'article 1.010.1829)
  - Orange, en bâtonnets (N° d'article 1.010.1830)
  - Black currant (cassis), en bâtonnets (N° d'article 1.010.1831)
  - Neutre, en bouteille (N° d'article 1.010.1798)
  - Sélection, en bâtonnets (N° d'article 1.013.4400)